

NSK
Create it



شرکت دوستکام
تجهیزات پزشکی و دارویی
(سهامی خاص)



نحوه شارژ دستگاه TC2

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهار جنوبی، بالاتر از چهارراه سمیه، کوچه حمید صدیق، شماره ۳۱
شعبه بلوار کشاورز: بلوار کشاورز، بین خیابان طوس و فلسطین، پلاک ۹۶
شعبه Dental center: بزرگراه نواب، بین پل مرتضوی و کمیل، مرکز تجارت دندانپزشکی ایران
شعبه بازار کاوه: خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، پاساژ کاوه، طبقه همکف، پلاک ۳۲


تلفن: ۷۷۵۳۴۶۵۲-۷۷۵۲۷۱۴۰ (خط ۸) فکس: ۷۷۵۳۰۳۶۲
تلفن: ۴۲۹۵۴ (خط ۳۰) فکس: ۸۸۹۸۴۰۱۴
تلفن: ۳-۶۶۳۸۰۰۰۱ فکس: ۶۶۳۸۰۰۰۴
تلفن: ۶۶۵۸۱۴۸۸-۶۶۵۸۱۴۷۷ فکس: ۶۶۵۸۱۴۹۵

www.doustkam.com


info@doustkam.com



۲. دکمه 0/1 را بروی حالت 1 قرار دهید.
به طوری که چراغ آن روشن شود.

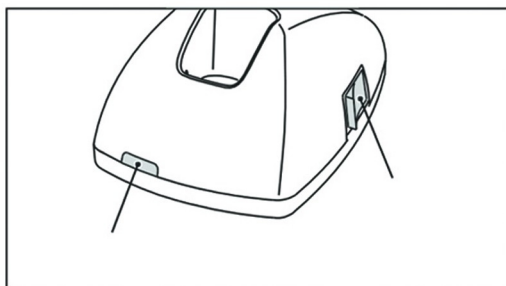

۱. ابتدا آداپتور را به پریز برق متصل نمایید
و سر دیگر آن را به پایه شارژ وصل نمایید.

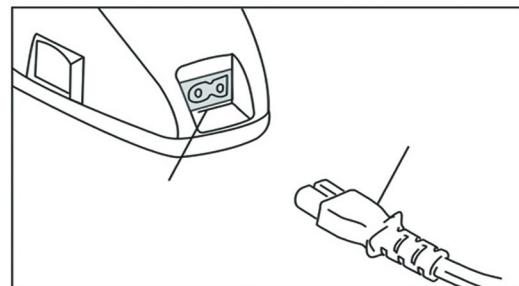

۳. میکروموتور را بر روی پایه شارژر قرار دهید.
به طوری که علامت پر شدن باتری بر روی LCD ظاهر گردد.

۴. هنگامی که باتری شارژ شود صدای بوق شنیده می شود و علامت FULL بر روی صفحه نمایش ظاهر می گردد.

در اولین مرتبه شارژ دستگاه TC2 رعایت نکات زیر الزامی است:

• اولین مرحله شارژ باتری نقش مهمی در طول عمر باتری ایفا می کند. از این رو می بایستی در اولین مرتبه، شارژ باتری به طور کامل انجام گیرد و تا زمان پر شدن کامل باتری (۸ ساعت در اولین مرتبه) از روشن نمودن دستگاه خودداری نمایید.

• می بایستی قبل از قرار دادن میکروموتور بر روی پایه شارژر، نایلون پلاستیکی که در قسمت پشت میکروموتور قرار دارد و به عنوان ضامن باتری عمل می کند را از دستگاه جدا نمایید. سپس میکروموتور را بروی پایه قرار دهید، و مراحل شارژ را با اتصال آداپتور به پایه ادامه دهید.

 شارژ باتری پر شده است

 شارژ باتری بین ۳۰ تا ۸۰٪ است

 شارژ باتری کمتر از ۳۰٪ است

 شارژ باتری خالی شده است

نشانه‌گر میزان شارژ باتری:

نکات مهم:

۱. در زمانی که صدای آلامر شنیده نشود و یا علامت باتری روی صفحه نمایش حرکت نکند می بایستی باتری تعویض گردد.

۲. نشانگر میزان شارژ باتری، نمایانگر ولتاژ باتری می باشد. در زمانی که هد و گیربکس را به میکروموتور متصل می نمایید مقدار ولتاژی که بر روی نشانگر ظاهر می شود کاهش می یابد.