



نحوه نگهداری میکروموتور GX-35 و هندپیس VH-E

دفتر مرکزی: تهران، خیابان بهار جنوبی، بالاتر از چهارراه سمیه، کوچه حمید صدیق، شماره ۳۱
شعبه بلوار کشاورز: بلوار کشاورز، بین خیابان طوس و فلسطین، پلاک ۹۶
شعبه Dental center: بزرگراه نواب، بین پل مرتضوی و کمیل، مرکز تجارت دندانپزشکی ایران
شعبه بازار کاوه: خیابان آزادی، روبروی دانشکده دامپزشکی، پاساژ کاوه، طبقه همکف، پلاک ۳۲

تلفن: ۷۷۵۳۴۶۵۲-۷۷۵۲۷۱۴۰ (خط ۸) فکس: ۷۷۵۳۰۳۶۲
تلفن: ۴۲۹۵۴ (خط ۳۰) فکس: ۸۸۹۸۴۰۱۴
تلفن: ۳-۶۶۳۸۰۰۰۱ فکس: ۶۶۳۸۰۰۰۴
تلفن: ۶۶۵۸۱۴۸۸-۶۶۵۸۱۴۷۷ فکس: ۶۶۵۸۱۴۹۵

نحوه نگهداری میکروموتور GX-35 و هندپیس VH-E



موتورهای مدل MIO , V-MAX و هندپیس VH-E لابرآتواری هستند لذا جهت استفاده در اتاق عمل توصیه نمی گردند. در میکروموتورهای لابرآتواری امکان استریل اجزاء وجود ندارد لذا در کاربردهایی که استریل نمودن دستگاه ضروری است، نایبستی از آنها استفاده نمود. در این سری از میکروموتورها و هندپیس ها امکان استفاده از قرص های فرمالین و یا دستگاه پلازما نیز وجود ندارد.



در صورتی که میکروموتور و هندپیس در داخل اتوکلاو قرار گیرد علاوه بر آنکه قطعات داخلی هندپیس دچار آسیب می شوند، ممکن است کابل از ناحیه سوکت دچار برآمدگی گشته و اتصال آن به میکروموتور به خوبی برقرار نگردد. همچنین ورود بخار آب به داخل میکروموتور سبب بروز خطا در عملکرد صحیح کلکتور دستگاه می گردد. به هیچ عنوان نایبستی از قرص فرمالین جهت استریل نمودن میکروموتور و هندپیس استفاده گردد، زیرا بخارات ناشی از آن سبب ایجاد رسوب در داخل کلکتور و در نتیجه قطعی آن می شود. با توجه به توضیحات فوق لازم به ذکر است که در کاربردهای جراحی از آنجا که استریل نمودن میکروموتور بسیار اهمیت دارد استفاده از موتورهای جراحی مدل SURGIC PRO ;SURGIC AP;SURGIC XT الزامی است.